

# Urgentné bezpečnostné oznámenie

## NovoPen® Echo®

### Ref. 2016050310

03.07.2017

### Dôležité bezpečnostné informácie

Vážený pacient!

Spoločnosť Novo Nordisk A/S zistila, že držiak inzulínovej náplne používaný v niekoľkých dávkach NovoPen® Echo® môže prasknúť alebo sa môže zlomiť pod vplyvom chemikálií, napríklad niektorých čistiacich prostriedkov. NovoPen® Echo® sa používajú pri inzulínovej liečbe osôb trpiacich cukrovkou.

Spoločnosť Novo Nordisk vyzýva ľudí trpiacich cukrovkou, ktorí používajú NovoPen® Echo® z jednej zo zasiahnutých dávok, aby držiak náplne vymenili, keďže niektoré môžu byť poškodené. Skontrolujte si, prosím, číslo dávky vášho zariadenia a porovnajte ho s nižšie uvedeným zoznamom zasiahnutých dávok.

Obrázok držiaka náplne je uvedený nižšie (obr. 1).



**Obrázok 1.** Obrázok držiaka náplne používaného pre NovoPen® Echo®.

#### Opis problému:

Ak sa držiak náplne dostane do kontaktu s konkrétnymi chemikáliami, môže prasknúť alebo sa zlomiť. Dôvod praskania je, že plastový materiál použitý pre držiaky náplne v zasiahnutých dávkach môže byť oslabený, keď sa dostane do styku s konkrétnymi chemikáliami nachádzajúcimi sa napríklad v niektorých čistiacich prostriedkoch. Pri čistení zariadenia podľa návodu na použitie nie je dôvod si myslieť, že dôjde k prasknutiu držiaka náplne.

Používanie zariadenia s prasknutým/zlomeným držiakom náplne môže spôsobiť, že zariadenie podá nižšiu dávku inzulínu, než sa očakáva, čo môže viesť k vysokej hladine cukru v krvi. Riziko vysokej hladiny cukru v krvi pri používaní zariadenia so zasiahnutým držiakom náplne bolo vyhodnotené na menej než 0,1 %, t. j. len 1 z 1000 pacientov bude trpieť vysokou hladinou cukru v krvi v dôsledku používania zasiahnutého držiaka náplne.

Varovné signály vysokej hladiny cukru v krvi (hyperglykémia) sa zvyčajne objavujú postupne a môžu zahŕňať sčervenanie, suchú pokožku, pocit ospalosti alebo únavy, sucho v ústach, ovocný (acetónový) zápach z úst, častejšie močenie, pocit smädu, stratu chuti do jedla, pocit nevoľnosti alebo choroby (nevoľnosť alebo dávenie).

Nemusíte mať žiadne fyzické príznaky vysokého cukru v krvi, ale môžete ho zaznamenať len podľa meraní hladiny cukru v krvi.

### Podrobnosti o zasiahnutých zariadeniach:

Čísla zasiahnutých dávok NovoPen® Echo® distribuované na Slovensku sú uvedené v nasledovných tabuľkách:

#### NovoPen® Echo® (320):

EVG4252-3	160 ks				
EVG4253-4	160 ks				

Tabuľka 4. Zoznam zasiahnutých dávok NovoPen® Echo® na Slovensku

Čísla dávok sú vytlačené na NovoPen® Echo® tak, ako je to uvedené nižšie (Obrázok 2).

**A**



**Obrázok 2.** Červené štvorce označujú miesto, kde je uvedené číslo dávky na A) NovoPen® Echo® a. Napr. číslo dávky na NovoPen® Echo® je FVG7364.

Ak máte zariadenie NovoPen® Echo® s číslom dávky **neuvedeným** vyššie, nemusíte sa ničoho obávať a môžete si byť istí, že pero bude fungovať tak, ako má.

### Čo robiť, ak používate NovoPen® Echo® s číslom z jednej z vyššie uvedených dávok:

- **Neprestávajú** s liečbou bez konzultácie so svojím lekárom.
- Dávajte pozor na svoju hladinu cukru v krvi sledovaním symptómov hyperglykémie. Ak spozorujete takéto prejavy, odmerajte si hladinu cukru v krvi tak, ako vám odporučil váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a uskutočnite potrebné kroky.
- V prípade, ak sa u vás vyskytli symptómy vysokej hladiny cukru v krvi v súvislosti s týmto produktom, poraďte sa s vaším lekárom.
- Zaregistrujte svoje kontaktné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail a číslo zasiahnutého držiaka náplne) na internetovej stránke vašej pobočky Novo Nordisk [[www.novonordisk.sk](http://www.novonordisk.sk)] alebo na firemnej internetovej stránke spoločnosti [www.novonordisk.com](http://www.novonordisk.com), resp. sa obráťte na miestnu zákaznícku službu Novo Nordisk, aby ste požiadali o bezchybný držiak náplne pre NovoPen® Echo®, ktorý by ste mali pripojiť a používať tak, ako je uvedené v návode na použitie na internetovej stránke [[www.novotraining.com/novopenecho/SK01](http://www.novotraining.com/novopenecho/SK01)].

- Oznámte akékoľvek nežiadúce udalosti alebo sťažnosti zákazníckej služby spoločnosti Novo Nordisk na čísle [+421 918 701 726] alebo prostredníctvom e-mailu na adrese [skbrcontact@novonordisk.com].

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, kontaktujte prosím svojho lekára, lekárnika alebo zákaznícku službu spoločnosti Novo Nordisk v krajine, v ktorej sa nachádzate.

Bezpečnosť pacientov je pre spoločnosť Novo Nordisk najdôležitejšia. Snažíme sa vyrábať a distribuovať produkty najvyššej kvality pre vaše využitie. Úprimne sa ospravedľujeme za túto nešťastnú situáciu a akékoľvek obavy alebo nepríjemnosti, ktoré môže spôsobiť.

S pozdravom,

Anna Koblková  
Quality & Customer Service Specialist  
Novo Nordisk Slovakia

#### Ďalšie informácie

**Zákaznícky servis**  
Anna Koblková

**Tel.č.**  
+421 918 701 726

**Email**  
skbrcontact@novonordisk.com

**<http://www.novonordisk.sk/>**